

Personal Protective Gown

월란 PP가운 제품소개




Full coverage isolation gown



Single use



Water resistant

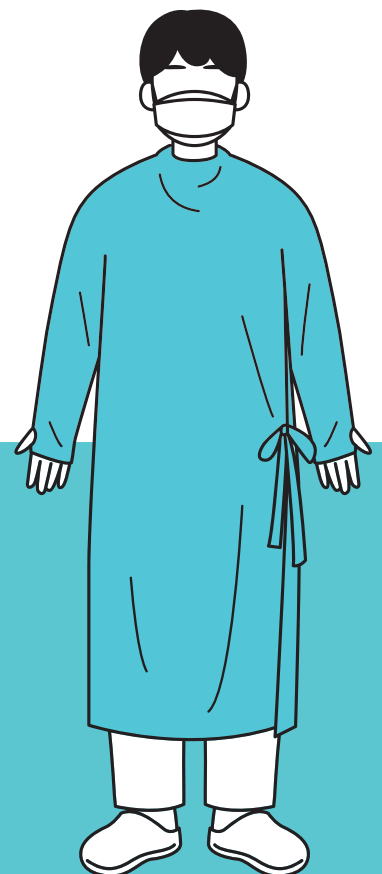



월란바이오텍 PP가운 특징점

- 월란PP가운은 일회용 방수성 긴팔 가운입니다.
- 접촉주의 대상환자(예 : VRE, MRSA, CRE, MRPA, MRAB, *C. difficile*, 옴 등)의 격리병실 출입 시 격리 가운으로 사용 가능합니다.
- 코로나19 의심환자의 검체채취 시 레벨D수준의 보호복(월란PP가운+수술모자+호흡기보호구+안면보호구+장갑+뱃신착용시)으로 활용이 가능하며, 후드형태의 전신보호복 위에 덧입어 활용하실 수 있습니다.



월란PP가운 착용방법

01. 가운펼치기




손 위생 후, 포장지에서 PP가운을 꺼내어 어깨쪽을 잡고 PP가운을 완전히 펼칩니다.

02. 양 손 넣기



소매에 양손을 넣고, 엄지손가락을 소매 끝 구멍(엄지손가락을 넣도록 고안됨)에 넣어주세요.

03. 목 뒤 끈 묶기

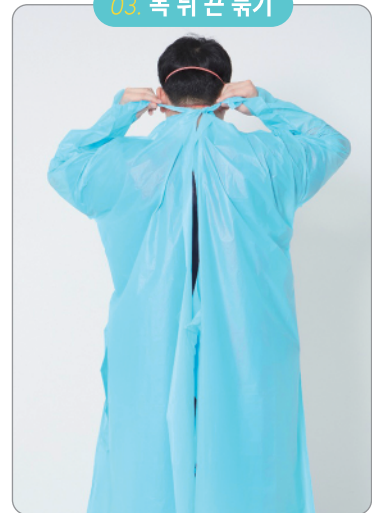

목 뒤에 끈을 묶어 주세요.
* 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의

04. 허리 끈 묶기



오른편 등 뒤에 있는 끈을 허리 왼쪽으로 가져 와 등 뒤가 다 덮이도록 끈을 묶어주세요.

탈의 시 주의사항



탈의 시 목끈을 풀기 전 장갑의 오염을 제거하여 주십시오.



사용한 가운은 최대한 몸에서 멀리 떨어뜨린 상태에서 돌돌 말아 폐기해주시요.



월란PP가운 활용사례

• 사례1



• 사례2




코로나 19대응을 위한 개인보호구 착용사례

• 미국 CDC



• 영국 NHS

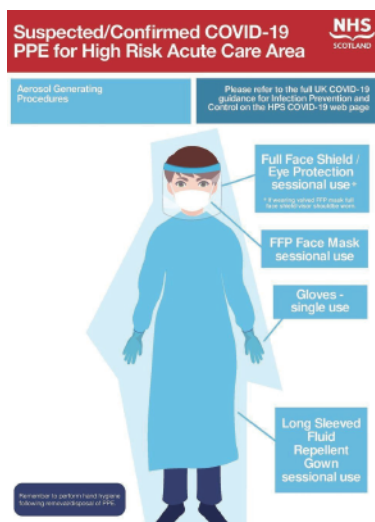

코로나 19대응 상황별 개인보호구 권장 범위

상황, 행위	개인보호구					
	수술용 마스크	KF94 등급의 호흡기 보호구	전동식 호흡기 보호구	일회용 장갑	일회용 방수성 긴팔가운	전신보호복 (덧신포함)
검역(검역조사)		●		●		
검역(역학조사)		●		●		●
선별진료소 접수, 안내		●		●	●	
선별진료소 진료, 간호		●		●	●	●
이송(구급차 운전자)		●		●		
이송(검역관, 보건소직원, 응급구조사 등)		●		●		●
구급차 소독		●		●		●
의심환자 병실출입, 진료, 간호 등		●		●	●	●
에어로졸 생성 처치		●		●	●	●
검사(X-ray 등 영상의학검사)		●		●	●	●
호흡기 검체 채취		●		●	●	●
검체 취급(실험실, 검사실 등)		●		●	●	●
검체 이송(파손없이 포장된 검체)	●			●		
시체 이송, 안치		●		●		●
병실 청소 및 소독		●		●	●	●
의료폐기물 포장 및 취급		●		●	●	●
의료폐기물 운반	●			●	●	

출처 : 중앙방역대책본부 중앙사고수습본부, 코로나바이러스감염증-19 대응지침(의료기관용) 제1판(20.8.20)



코로나19대응을 위한 의료기관의 상황별 개인보호구 기준

장 소(구역)	활동	개인보호구 권장 기준	
		중환자	응급환자
고위험 환자 지역 1.의료기관 및 응급실 선별진료소 2.호흡기 환자 클리닉 (일반환자와 구분된 의료 기관) 3.격리실 (중환자실과 응급실 등)	일상적 환자 진료와 에어로졸 발생 시술	1. 개인보호구 종류 - KF94 등급 이상의 마스크 - 고글 - 일회성 방수성 긴팔가운 - 일회용 장갑 - 모자(옵션)	1. 개인보호구 종류 - KF94 등급 이상의 마스크 - 고글 - 일회성 방수성 긴팔가운 - 일회용 장갑 - 모자(옵션)
	환자와 접촉하지 않음(예) 병실외 지역)	수술용 마스크	수술용 마스크
일반 환자 지역	일상 환자 진료	수술용 마스크 표준 주의 / 전파별 주의	수술용 마스크 표준 주의 / 전파별 주의
	에어로졸 발생 시술	1. 개인보호구 종류 - KF94 등급 이상의 마스크 - 고글 - 일회성 방수성 긴팔가운 - 일회용 장갑 - 모자(옵션)	1. 개인보호구 종류 - KF94 등급 이상의 마스크 - 고글 - 일회성 방수성 긴팔가운 - 일회용 장갑 - 모자(옵션)
비환자 지역	환자와 접촉하지 않음	수술용 마스크	수술용 마스크
	환자와 접촉하지 않음	수술용 마스크	수술용 마스크

출처 : 중앙방역대책본부 중앙사고수습본부, 코로나바이러스감염증-19 대응지침(의료기관용) 제1판(20.8.20)



주소 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 80

Tel. 031-683-8845

Fax. 031-683-8555

www.wallan-bio.com

품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 한글표시사항

상품명 : 일회용 방수성 긴팔 가운

용도 : 비말, 혈액, 체액이 전신이나 의복에 오염되어 간접 전파되는 것을 방지

재질 : PE 색상 : 연한청록

원산지 및 제조국 : 한국

제조사 : (주)월란바이오텍, 경기도 평택시 청북산단로 80

본 제품은 일회용으로 감염 예방을 위해 재사용 하지 마십시오.

본 제품에 이상이 있을 경우 고객센터 (031-683-8845)로 연락하여주세요.

사이즈 : 2종류 M L

월란PP가운 1Box
50개입(개별포장)



<1입 개별포장 예>